
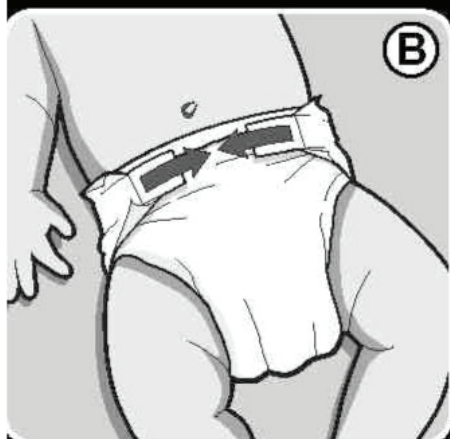


TARTALOM

1.	FONTOS - ELŐSZÖR OLVASSA EL!	32
2.	Bemutatkozás	34
3.	A készülék részei	35
4.	Rövid indítási ismertető	36
5.	Pelenka illeszkedési tudnivalók	36
6.	Snuza elhelyezése	37
7.	Működés	37
	7.1 Bekapcsolás.....	37
	7.2 Megfigyelés.....	37
	7.3 Utazás.....	39
	7.4 Ruházat.....	39
	7.5 Babaőrzők és Video monitorok.....	39
8	Működési módok	39
	8.1 Kattogó "tikk" hang beállítása	39
	8.2 Ébresztő riasztó funkció.....	39
	8.3 Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása	40
9	Elem	40
	9.1 Elemjelző fény.....	40
	9.2 Elem élettartam	41
	9.3 Elemcsere.....	41
	9.4 Eldobás	42
10	Karbantartás	42
	10.1 Elővigyázatosság	42
	10.2 Tisztítás és Tárolás	42
11	Problémamegoldás	42
12	Lemondó nyilatkozat	42
13.	Garancia	43

1. FONTOS - ELŐSZÖR OLVASSA EL!


Lényeges, hogy a Snuzsa érzékelő része mindig kapcsolatban legyen a baba hasával.

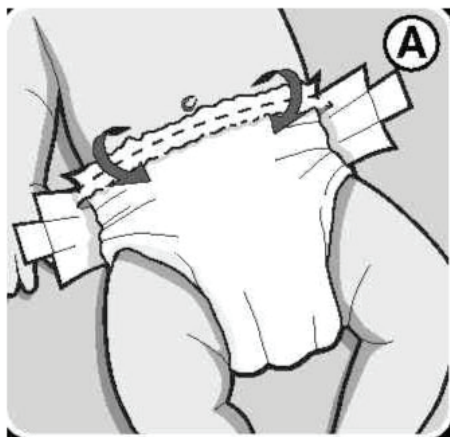


MINDIG:

Használjon megfelelő méretű pelenkát. A túl nagy pelenka bő lehet a hasnál, ami miatt a Snuzsa elveszítheti az érintkezést. Hajtsa vissza a pelenka derékövi részét a Snuzsa felcsiptetése előtt, hogy megfelelő vastagságú legyen. Használja a pelenka rögzítőjét úgy, hogy elég szorosan, de kényelmesen rögzítse a hashoz.

Rögzítse a Snuzsa-t a pelenkához az övcsipesszel, de teljesen tolja rá.

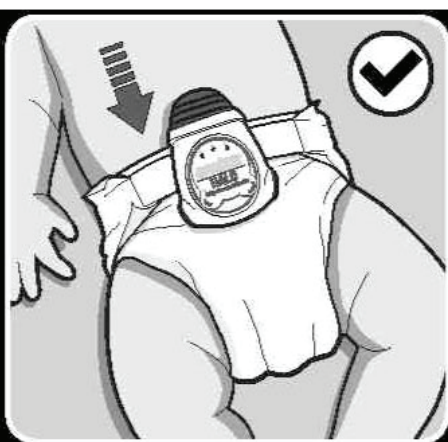

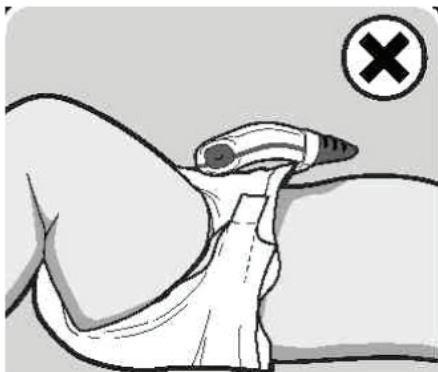


Győződjön meg róla, hogy a Snuzi derékszögben helyezkedik el a pelenkán, és hogy az érzékelő érintkezik a baba hasával. Nyomja meg az ON/OFF Be/Ki (6) kapcsoló gombot a Snuzi működtetéséhez.



Mindig kövesse az alábbi utasításokat, hogy biztos lehessen abban, hogy a készülék figyelni gyermeke élettani mozgásait, és megelőzhesse a téves riasztást, amit az érintkezés megszakadása okozhat.

MEGJEGYZÉS:

Óvatosan kezelje a Snuzi-t, hogy elkerülje az övcsipesz, vagy az érzékelő sérülését.

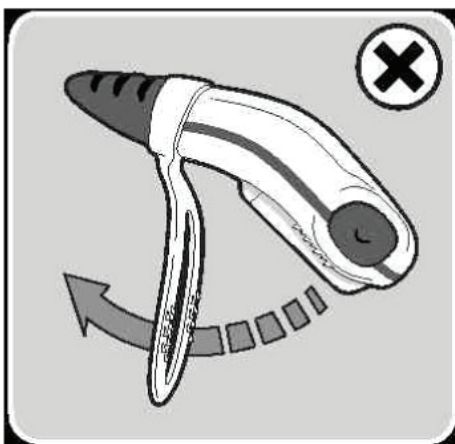

2. BEMUTATKOZÁS

A Snuza Hero egy mobil babafigyelő készülék, amely biztonságosan és megfelelően figyeli gyermeke mozgásait, amíg ő alszik.

A teljes mobilitásért Önnek csak gyermeke pelenkájára kell csiptetnie a Snuza Halo-t. Nincsenek kábelek, zsinórok, érzékelő padok, és nincs szükség külső áramforrásra.

Csatolja fel, kapcsolja be, és pihenjen.

A Snuza még a finom mozgásokat is érzékeli és akkor is riaszt, ha a mozgások nagyon gyengék, vagy a percenkénti mozgásszám 8 alá esik. Ha 15 mp-ig egyáltalán nem érzékel mozgást, akkor gyengéden rezegni kezd. Gyakran ez a rezgés elég, hogy felébressze a babát, és a Snuza Hero újra megfigyelés módba kapcsol.

Három rezgés bekapcsolása után a Rezgő riasztás figyelmezteti Önt, hogy gyermeke mozgása három alkalommal leállt 15 mp-re.

Ha további 5 mp-ig nem érzékel mozgást, akkor a Snuza Hero riasztással jelez Önnek.




3. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Előlnézet



Hátulnézet


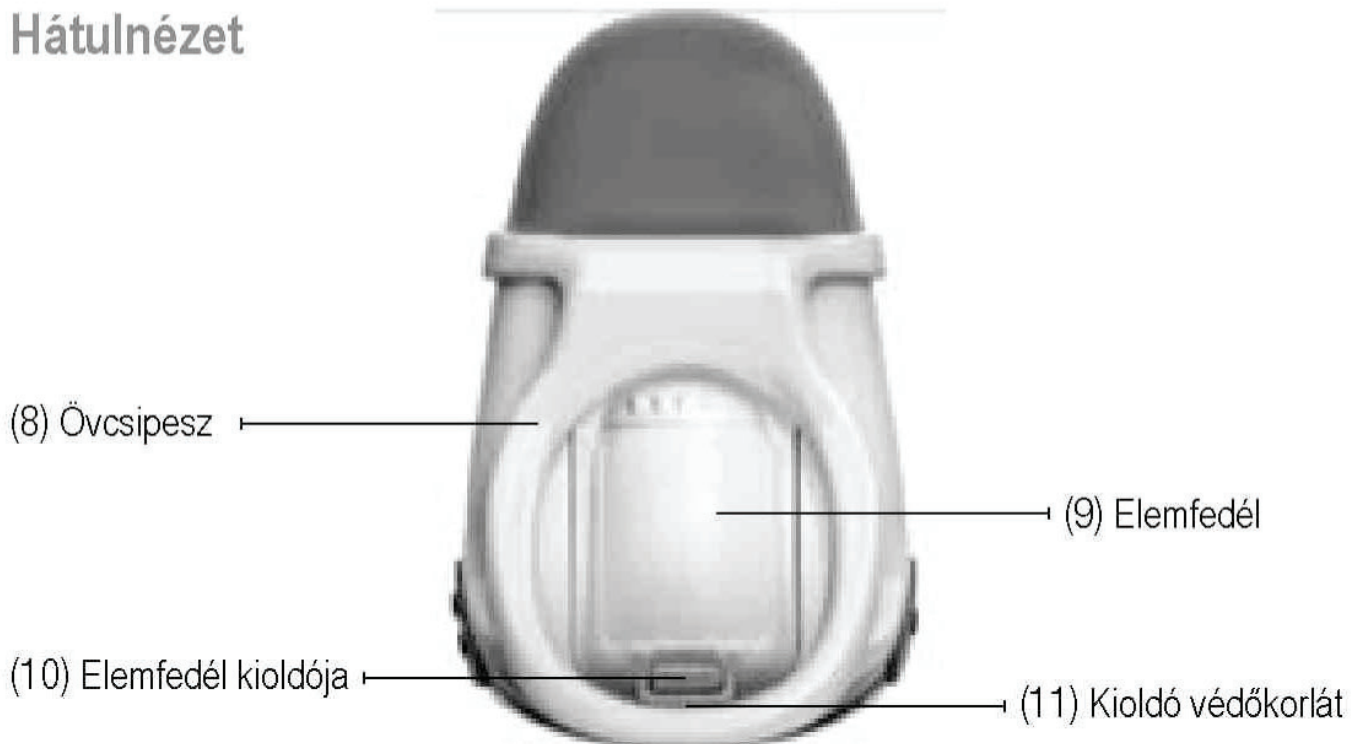


4. RÖVID INDÍTÁSI ISMERTETŐ

1. **Fontos:** Használjon megfelelő méretű pelenkát és győződjön meg róla, hogy kényelmesen illeszkedik (Lsd. 5. *Pelenka illeszkedési tudnivalók* részt).
2. Kapcsolja be röviden megnyomva az ON/OFF Be/Ki kapcsoló gombot (6).
3. Az indítási teszt során a jelzőlámpák bekapcsolnak, rezeg a stimulátor, indítási dallamot játszik, és elvégez egy elem-tesztet.
4. Csatolja fel a Snuza Hero-t a pelenkára úgy, hogy az érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával (Lsd. 6.részt, *Snuza elhelyezése*).
5. A mozgást jelző lámpa (3) villog a mozgásoknál. Lsd. 7.2 *Megfigyelés* c. részt a részletes leírásért.
6. Ha 15 mp-ig nem érzékel mozgást, akkor a rezgő stimulátor megpróbálja felébreszteni a babát.
7. Ha további mozgásokat érzékel 5 mp-ben belül, akkor a Mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog, hogy jelezze, volt egy 15 mp-es mozgáskimaradás.
8. Három rezgés után, a Rezgő riasztás bekapcsol – a Snuza minden 2.mp-ben csippan, és a Mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog minden csippanásnál.
9. Ha a mozgás nélküli periódus eléri a 20mp-et, akkor teljes riasztás hallható és a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog.
10. A riasztást a MODE/OFF gomb (7) rövid megnyomásával kapcsolhatja ki, és így a megfigyelés tovább folytatódik.
11. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombot egyszerre. Egy kikapcsolási hangot fog hallani.

5. PELENKA ILLESZKEDÉSI TUDNIVALÓK


Fontos: A megfelelő pelenkázás alapvető a Snuza működéséhez. A pelenka felső vékony ragasztós részét rá kell hajtani a vastagabb részre mielőtt bezárja a pelenkát (ez lesz az a rész ahová a Snuza Hero-t csatlakoztatni kell). A pelenkát kényelmesen rögzítse a babára, úgy hogy a felső része éppen a köldök alatt legyen. A testhezálló pelenka kilazulása miatt a készülék elveszítheti az érintkezést a babával, és így tévesen riaszt. A nagyon „teli”, vagy nedves pelenka is okozhat kitéágulást a pelenkán.

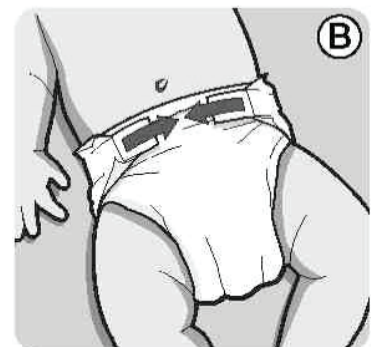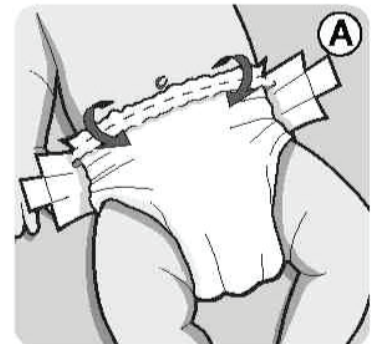


6. SNUZA ELHELYEZÉSE

Ellenőrizze, hogy az elemfedél (9) jól zár. Csatolja fel a Snuzát a pelenkára, a csipeszt teljesen rátolva, ahogy a képen látszik.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az érzékelő (1) érintkezzen a baba hasával a köldök környékén, ill. az oldalakhoz közelebbi elhelyezés is alkalmas lehet, különböző alvási pozíciókban.

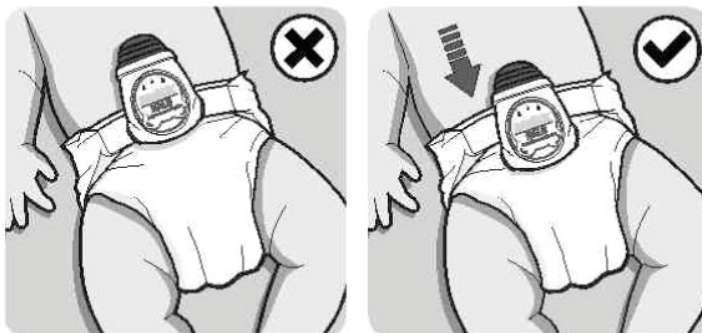

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt ajánlja, hogy altassa a babát a hátán, ha a gyermek orvosa ezt másképp nem javasolja.

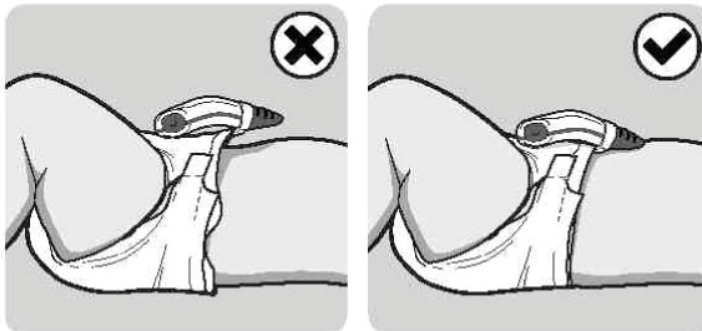

7. MŰKÖDÉS

7.1 Bekapcsolás

Kapcsolja be az ON/OFF gomb (6) rövid megnyomásával.

Egy indítási tesztet végez a készülék, amikor minden jelzőlámpa (sorrendben) bekapcsol, a rezgő stimulátor rezeg, és riasztást hall.

Az elemjelző lámpa (2) rövid felvillanással jelzi az elemszintet:-

- ☐ Elem rendben
- ☒ Elem hamarosan lemerül – **cserélni kell**
- ☒ Elem üres – Snuz nem figyeli a mozgást. **Az elemet cserélni kell**

Figyelmeztetés: Alaposan figyelje meg az indítási teszt során, hogy minden lámpa világít, a rezgés és a riasztás rendben működik, és hogy az elemfeszültség elég a működéshez (zöld vagy sárga fény). **Máskülönben, NE HASZNÁLJA a készüléket.** Ha az elem már lemerült, akkor az elem feszültséget jelző lámpa pirosan villog, és rövid csippanást hall minden mp-ben. **Ebben az esetben cserélje ki az elemet, mielőtt használná** (ld. 9.3 *Elemcsere részt*).

Kikapcsoláshoz nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat egyszerre.

7.2 Megfigyelés

A megfigyelés alatt a mozgást jelző lámpa (3) mutatja az információkat a baba mozgásáról, míg a riasztást jelző lámpa (4) figyelmezteti Önt a lehetséges problémákra.

A mozgást jelző lámpa (3) villog az alábbiak szerint:-

- | | |
|---|--|
| ● Zöld | Normál mozgás. |
| ● Narancssárga | Nagyon kicsi és gyenge mozgás (mint pl. nagyon gyenge légzés). |
| ● 🎵 Narancssárga és kettős csippanó hang (alacsony mozgásszám riasztás) | A mozgások száma 8 alá csökkent percenként. Ha a mozgásszám újra 8 fölé emelkedik percenként, akkor a mozgást jelző lámpa újra zölden villog (normál), és a riasztás leáll. A funkció leállításához lsd. A 8.3 <i>Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása</i> c.részt. |
| ● Piros | Történt egy 15 mp-es mozgáskimaradás, amikor a mozgás újraindult a rezgő funkció után (lsd.alább). |
| ● 🎵 Piros és Rezgő riasztási hang (csippanás Minden 2.mp-ben) | A Rezgő riasztás azt jelzi, hogy volt 3 rezgés/ felébresztés funkció. A funkció leállításhoz lsd. a 8.2. <i>Ébresztő riasztó funkció</i> c. részt. |

A riasztást jelző lámpa (4) a következőket jelzi:-

- | | |
|---------------------------------|--|
| ● (()) Pirosan villog és rezeg | Ha nem érzékel mozgást 15 mp-ig, a Snuza Halo gyengéden rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát. A riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog ezzel együtt. Ha mozgást érzékel a köv. 5 mp-ben, akkor a Mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog az ezutáni mozgásoknál. Ez egy figyelmeztetés, hogy történt egy 15 mp-es mozgáskimaradás. |
| ● 📢 Pirosan villog és riaszt | Ha továbbra sem érzékel semmilyen mozgást, a rezgés utáni 5 mp-ben (összesen 20 mp-ig), akkor a riasztást jelző lámpa (4) pirosan villog és teljes riasztási hangot hall.
A riasztást kikapcsolhatja a MODE/OFF gomb (7) rövid megnyomásával, vagy kikapcsolhatja a Snuza Halo-t teljesen (nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombot egyszerre). Ha a MODE/OFF gombot használja a riasztás kikapcsolásához, akkor a megfigyelés tovább folytatódik. |

7.3 Utazás

Ha a baba túl sok mozgásnak van kitéve, mint például babakocsiban tolva, vagy autóban vagy repülőn utazva, akkor lehetséges, hogy a baba mozgásaként ezeket a nem a babától származó mozgásokat érzékeli az érzékelő. *Emiatt a Snuza Hero-ban ne bízson, ha ilyen külső források is mozgást okoznak.*

7.4 Ruházat

- A Snuza-t felcsiptetheti a pelenka visszahajtott derékrészére, vagy a rugalmas bugyi / nadrág derékrészére úgy, hogy az érzékelő rész (1) mindvégig érintkezzen a baba hasával.
- Lehet egy vékony ruha (pl. trikó) az érzékelő és a baba bőre között, de győződjön meg róla, hogy az érintkező mindvégig kapcsolatban marad.
- A készüléket használhatja úgy is, hogy egy könnyű ruha (pl. rugdalózó) van a pelenka vagy a nadrág felett, amihez a Snuza csiptetve van.
- A túl sok ruha lehalkítja, vagy tompíthatja a riasztást. Győződjön meg róla, hogy biztosan hallja a riasztást, ha a baba fel van öltöztetve, és/vagy be van takarva.

7.5 Babaőrzők és Video monitorok (Tetszőleges)

A Snuza Hero használható babaőrzővel vagy Video monitorral együtt is, hogy megnövelje azt a távolságot, ahol a riasztás hallható.

8. MŰKÖDÉSI MÓDOK

8.1 Kattogó “tikk” hang beállítása

Ezzel a Snuza egy hallható ‘tick’ hanggal is jelzi a mozgásokat. Hogy kikapcsolja ezt a hallható ‘tick’ hangot, győződjön meg róla, hogy a Snuza be van kapcsolva, és nyomja meg röviden (kevesebb, mint 1mp) a MODE/OFF gombot (7).

Ha hangosítani szeretné, ezt a tick hangot, akkor nyomja meg a MODE/OFF gombot még egyszer a közepes hangerőhöz, és újra a legmagasabb hangerőhöz.

A kikapcsoláshoz nyomja meg röviden a MODE/OFF gombot 4-szer, - a Snuza egy hangosabb csippanással jelez.

Ezt a funkciót használhatja babaőrzővel együtt is, hogy távolabbról is ‘hallja’ a baba mozgásait.

8.2 Ébresztő riasztó funkció

A megfigyelés alatt, ha a Snuza nem érzékel mozgást 15mp-ig, akkor finoman rezegni kezd, hogy megpróbálja felébreszteni a babát. Ha következő 5mp-ben újra mozgást

érzékel, akkor a mozgást jelző lámpa (3) pirosan fog villogni a további mozgásoknál, hogy jelezze, volt egy 15mp-es mozgáskimaradás.

A rezgő riasztás lehetővé teszi, hogy 3 ilyen rezgő funkció után a mozgást jelző lámpa (3) pirosan villog minden 2.mp-ben és egy csippanó hangot ad minden 2.mp-ben. Ez figyelmezteti Önt arra, hogy három alkalommal 15 mp-re leállt a baba minden mozgása, és újra mozogni kezdett a rezgő funkció bekapcsolása után.

Megjegyzés:- Ha a mozgás nem indul újra a köv.5 mp-ben a rezgés után, akkor teljes riasztást hall, és a riasztást jelző lámpa (4) pirosan fog villogni.

A rezgés riasztás automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor bekapcsolja a készüléket. Hogy kikapcsolja ezt a riasztó funkciót, győződjön meg róla, hogy a Snuza be van kapcsolva, és nyomja meg a MODE/OFF gombot (7) legalább 1 mp-ig, amíg egy hangot nem hall, és a készülék röviden nem rezeg.

Ha újra be szeretné kapcsolni ezt a rezgés riasztást, akkor kapcsolja ki a Snuza-t teljesen, (nyomja meg egyszerre az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat), majd újra kapcsolja be a készüléket (A rezgés riasztás funkció automatikusan bekapcsolt állapotban van minden bekapcsoláskor).

8.3 Alacsony mozgásszám riasztás kikapcsolása

Az alacsony mozgásszám riasztás figyelmezteti Önt, ha a baba mozgásainak száma 8 alá csökken percenként – a mozgást jelző lámpa (3) narancssárgán villog, és alacsony mozgásszám riasztást hall (kettő csippanás minden mp-ben) Ez a funkció automatikusan működik, amikor bekapcsolja a Snuza-t.

Ha ki szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor legyen bekapcsolva a Snuza és nyomja meg az ON/OFF gombot (6) több, mint 1mp-ig, amíg nem csippan a készülék.

Ha újra vissza szeretné kapcsolni ezt a funkciót, akkor kapcsolja ki teljesen a Snuza-t (nyomja meg az ON/OFF (6) és a MODE/OFF (7) gombokat egyszerre), és kapcsolja be újra. Az alacsony mozgásszám riasztás automatikusan bekapcsolt állapotban van, amikor bekapcsolja a készüléket.

9. ELEM

9.1 Elemjelző fény

Ha az elem megfigyelés közben lemerül, akkor az elemjelző lámpa (2) így villog:-

● Pirosan villog a mozgásoknál

Hamarosan lemerül – cserélje ki az elemet a köv.használat előtt.

●🎵 Pirosan villog a mozgásoknál és az alacsony elemjelző figyelmeztetés szól, csippanás 2 mp-ként.

Elem lemerült – **Nem működik a megfigyelés.** Cserélje ki az elemet, mielőtt használná a készüléket.

Ha az elem lemerül, akkor cserélje ki az elemet a következő használat előtt (ld. 9.3 *Elemcsere* c. részt).


9.2 Elem élettartam

A cserélhető elem kb. 12 hónapig kitart, ha átlagosan 6-szor használják egy nap összesen 18 órát, 1 riasztással, ami nem hosszabb 20 mp-nél. Az elem élettartama eltérhet ettől, ha eltérő a napi használati idő, és/vagy a riasztási idő, és/vagy a riasztások száma. A Snuza Halo felesleges be és kikapcsolása is túl hamar lemeríti az elemet. Ha a riasztások száma magas, akkor ellenőrizni kell a pelenkai elhelyezést.

9.3 Elemcsere

Csak LS14250 számú elemmel használja, amely a hivatalos Snuza disztribútoroknál, vagy speciális elemeket áruló kereskedőknél elérhető (kérjük nézze meg a **www.snuza.com** internetes oldalt a hivatalos disztribútorokról).

1. Használja a körmét, vagy egy kicsi lapos csavarhúzó, hogy benyomja az elemfedél kioldóját (10) a készülék hátoldalán.

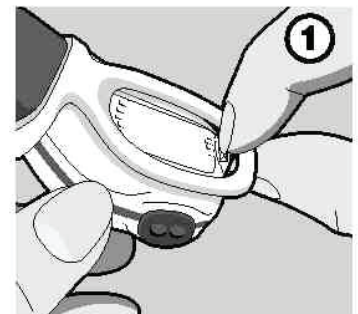

2. Amikor ezt a kioldót kb. 1mm-rel benyomta, akkor az elemfedélnek fel kell pattannia. A kioldó védőkorlátja (11) megakadályozza, hogy túlzottan benyomja a kioldót. Ne próbálja ennél jobban behajlítani a kioldót.



3. Vegye ki a lemerült elemeket.

4. Tegye be az új elemet, ügyelve a helyes polarításra (igazodjon az elem pozitív '+' fele az elemtartó pozitív jeléhez, ahogy jelölve van). Tegye vissza az elemfedeleket, és győződjön meg róla, hogy jól zár.



5. Tesztelje a készüléket úgy, hogy bekapcsolja, és meggyőződik róla, hogy az elemjelző fény (2) zölden villog.

6. Ha a készülék csippan, miután kicserélte az elemet, csak nyomja meg az ON/OFF (BE/Kikapcsoló) és az MODE/OFF gombokat egyszerre, hogy kikapcsoljon.



9.4 Eldobás

Az elemet az országban, az elemekre érvényes megsemmisítési és újrahasznosítási szabályok szerint kell eldobni.

10. KARBANTARTÁS

10.1 Elővigyázatosság

- Ne tegyen semmit a Hangkibocsátó nyílásba (2), mert ezzel károsodhat a készülék.
- Ne kerüljön semmi folyékony a hangkibocsátó nyílásba.
- Kerülje az érzékelő szükségtelen hajlítását (kép 1).
- Ne használjon aránytalanul nagy erőt a csipesz hajlításához (kép 2).
- Ne nyomja az elemfedél kioldóját (10) a védőkorlát (11) mögé.

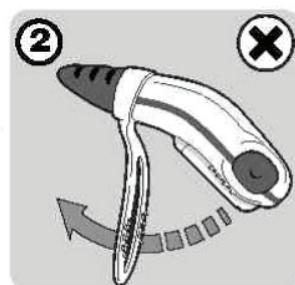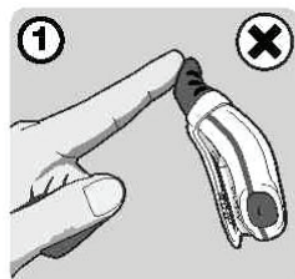

10.2 Tisztítás és tárolás

- Finoman törölje le egy nedves ronggyal a szennyeződések. Enyhe szappant használhat a rongyon, a makacs kosz ellen.
- Ne használjon más tisztítószer, mert azok káros vegyszereket tartalmazhatnak.
- A készülék cseppálló, de nem vízálló. Ne mártsa vízbe. Ha nedves lesz, törölje rögtön szárazra.
- Amikor kicseréli az elemet, akkor a koszt ami beszorul az elemfedél nyílásába, és a tok közé, egy száraz pamut ronggyal kitörölheti, ha az elemfedelelet (9) úgyis elmozdította. Győződjön meg róla, hogy a tömítés is tiszta mielőtt visszarakja az elemfedelelet, mert az veszélyeztetheti a tömítést.
- Ha nem használja a készüléket, tegye a védődobozba a biztonságos tárolás miatt. Ne tárolja nedves, párás helyen, mert az hatással lehet a készülékre és üzemzavart okozhat.

11. PROBLÉMAMEGOLDÁS

1. A Snuzza helytelen felhelyezése a baba pelenkáján (Isd. 5 *Pelenka illeszkedési tudnivalók* és 6. *Snuzza elhelyezése c.részt*)
2. Elemhiba. Az elemjelző lámpa (2) piros színt mutat (Isd. 9.3 *Elemcsere c. részt*).
Kérjük látogassa meg a **www.snuza.com** internetes oldalt további információkért.

12. LEMONDÓ NYILATKOZAT

A vásárlók saját kockázatukra, felelősségükre használják a készüléket, a Biosentronics cc, és annak tagjai, alkalmazottjai, ügynökei, szerződött partnerei, képviselői, gyártói,

forgalmazói és egyesületei („SNUZA”) nem tarthatóak felelősnek semmilyen hátrányért, károsodásért, vagy sérülésért, amit a vevő, vagy más személy, aki kapcsolatban volt a készülék használatával, vagy gyártásával, elszenvedett, beleértve azt a veszteséget, kárt, vagy sérülést, amit a vevő, vagy más személy a készülék hibájából, vagy minden jótállásból, vagy minden egyéb jog alapján felmerült okból elszenvedett, ezek a felelőségek ezáltal kizártak, és a vevő ezáltal semmilyen kárpótlásra nem jogosult.

13. GARANCIA

A Biosentronics cc garantálja, hogy készülék nem hibásodik meg, sem az anyagában, sem a működésében 12 hónapon belül a vásárlás napjától számítva, amit blokkal igazolni kell. A termék működésével kapcsolatos intézkedésekért a használó felelős. Fenntartjuk a jogot ezen garanciális intézkedések megváltoztatására minden előzetes bejelentés nélkül. Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen használatra, alkalmazásra, az elemre, vagy a szállítási sérülésekre.

JÓTÁLLÁSI JEGY

A fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikke a
151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet alapján

1. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. (Fogyasztó: a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk.685 § d.pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet 2.§ alapján.
2. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik. A termék, vagy jelentős részének cseréje esetén a jótállás a jelentős részre újra kezdődik.
3. Kérjük a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa a kezelési útmutatót.
4. Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval.
5. Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használható.
6. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
7. A jótállási kötelezettség teljesítése az importőrt terheli.
8. A fogyasztó a jótállás iránti igényét a forgalmazónál (importőrnél) érvényesítheti.
9. A készüléket meghibásodás esetén az importőrhöz kell eljuttatni, személyesen, vagy postai úton, a jótállási jeggyel együtt. A forgalmazó az utánvétellel feladott készüléket átveszi, feltéve ha a fogyasztó a küldeményről és a meghibásodásról előzetesen tájékoztatta.
10. Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított 72 órán belül meghibásodik, a forgalmazó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni.
11. A fogyasztó jótálláson és szavatosságon alapuló jogait a következő jogszabályok és rendeletek szabályozzák: 151/2003 (IX.22) Korm.Rend.; Ptk.685 § e.pont; Ptk. 305 § - 311/A-ig ; 49/2003 (VII.30) GKM Rend.
12. Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben azzal érvényesíthet, ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Ebben az esetben a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a számlát / blokkot feltétlenül őrizze meg, hogy kétséget kizáróan igazolni tudja a fogyasztói szerződés megkötését.
13. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

14. Jótállási igény nem érvényesíthető a következő esetekben.

- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése esetén, a jótállási jegy érvénytelen.
- A használati utasítástól eltérő, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkező hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.
- Átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
- Nem vonatkozik a jótállás törött, repedt alkatrészekre vagy tartozékokra.
- Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik, hogy a termék CE jelzéssel van ellátva, mely jelzi, hogy a termékek megfelelnek a következő, forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek:

2001/95/EC

89/336/EEC

CE Certifikáció száma: TRQS 3073014-B